



PETUNJUK PENGGUNAAN

BIO MARKING DYE - BLUE

Product code	Description	Size
05-000-030	30 ml bottle with dropper, 7 colors	7 x 30 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, blue	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, blue	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, blue	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, black	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, black	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, black	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, green	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, green	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, green	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, yellow	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, yellow	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, yellow	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, orange	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, orange	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, orange	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, red	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, red	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, red	1 x 240 ml
05-014-030	30 ml bottle with dropper, purple	8 x 30 ml
05-014-030-1	30 ml bottle with dropper, purple	1 x 30 ml
05-014-240	240 ml bottle, purple	1 x 240 ml

Hasil yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

Metode :

- 1) Kocok botol sebelum digunakan
- 2) Untuk specimen segar (belum difiksasi), gunakan pewarna pada jaringan langsung dari botol atau dengan menggunakan kuas, biarkan mongering selama 2-3 menit dan fiksasi menggunakan formalin.
- 3) Untuk specimen yang telah difiksasi, hilangkan fiksatif yang berlebih pada permukaan jaringan dan gunakan pewarna seperti pada specimen segar.
- 4) Pewarna menempel pada permukaan jaringan pada suhu ruang (15-30°C) dalam 2-3 menit.
- 5) Setelah penggunaan, tutup botol untuk mencegah penguapan.

PT. Pillar Harmony

Rukan Malibu Blok H35/36
City Resort Residence, Jakarta Barat 11730
Telp. 021 - 2940 5822, Fax. 021 - 2940 5833
e-mail : pillarharmony@cbn.net.id



Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus.
Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label.
Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja.
Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.
Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.
Jauhkan dari panas/percikan/sumber api. Jangan merokok.
JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): segera lepas semua pakaian yang terkena. Bilas dengan air.