



PETUNJUK PENGGUNAAN

Biodec R

<u>Catalog number</u>	<u>Size</u>
05-M03009	1 x 500 mL
05-03009Q	4 x 2,5 L

Tujuan yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

Metode :

- 1- Rasio volum spesimen/dekalsifier 1:100
- 2- Waktu prosedur 6-12 jam untuk ketebalan <5mm.
- 3- Setelah prosedur dekalsifikasi: rekondisi sampel. Bilas dengan air mengalir dalam 1 jam atau lakukan 3 kali PBS pH 7.4, masing-masing 20 menit.

Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus. Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label. Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja. Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.

Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.

Cuci tangan dengan saksama setelah ditangani.

JIKA TERHIRUP: Keluarkan korban ke udara bersih dan jaga posisinya agar nyaman untuk bernafas.