



PETUNJUK PENGGUNAAN

Eosin Y alcoholic Solution

| Catalog number | Size |
|----------------|------------|
| 05-B10003 | 1 x 150 mL |
| 05-M10003 | 1 x 500 mL |
| 05-10003/L | 1 x 1 L |
| 05-10003E | 1 x 2,5 L |
| 05-10003Q | 4 x 2,5 L |

Tujuan yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

Metode :

Pewarnaan eosin (pewarnaan sitoplasma) di kombinasi dengan hematoxylin (pewarnaan inti sel) adalah metode yang paling sering digunakan dalam rutinitas histopatologi.

- 1- Hematoxylin-eosin (untuk pewarnaan rutin)

| | |
|---|----------|
| Air | |
| Mayer's hemalum | 5 menit |
| Air keran (atau scott water selama 1 menit) | 5 menit |
| Eosin Y alcoholic Solution | 5 menit |
| Absolute ethanol | 30 detik |
| Absolute ethanol | 30 detik |
| Clearing agent dan mount | |
- 2- Hematoxylin-eosin (untuk pewarnaan ektemporer)

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Harris' hematoxylin (atau Gill 3) | 10 celup |
| Scott's water | 10 celup |
| Eosin Y Alcoholic solution | 10 celup |
| Etanol Absolut | 10 celup (3 kali) |
| Clearing agent dan mount | |

Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus. Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label. Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja.

Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.

Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.

Jauhkan dari panas/percikan api/api terbuka/permukaan panas. Jangan merokok.

JIKA TERKENA KULIT (dan rambut): segera lepas semua pakaian yang terkena. Bilas kulit dengan air.