



## PETUNJUK PENGGUNAAN

### Papanicolaou OG6

<u>Catalog number</u>	<u>Size</u>
05-12013	1 x 500 mL
05-12013/L	1 x 1 L
05-12013E	1 x 2,5 L
05-12013Q	4 x 2,5 L

### Hasil yang diharapkan

Produk untuk persiapan spesimen ginekologi, urin, sitologi, spesimen jarum, dahak dan pencucian bronkial, untuk ditentukan dengan mikroskop.

### Metode :

Untuk pelaksanaan metode pewarnaan harus menggunakan reagensia Papanicolaou EA50 dan Papanicolaou Harris Hematoxylin.

1- Etanol 95%	2 menit
2- Air distilasi	2 menit
3- Harris hematoxylin	1 menit
4- Air keran	5 menit
5- Etanol 95%	15 detik
6- OG6	2 menit
7- Etanol 95%	15 detik
8- Etanol 95%	15 detik
9- EA50	5 menit
10- Etanol 95%	15 detik
11- Etanol absolut (2x)	30 detik
12- Xilena (2x)	2 menit

### Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus. Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label. Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja. Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

### Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.

Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.

Jauhkan dari panas/percikan api/api terbuka/permukaan panas. Jangan merokok.

Jaga agar tempat selalu tertutup rapat.

JIKA TERKENA KULIT (dan rambut): segera lepas semua pakaian yang terkena. Bilas kulit dengan air.